

CUSCINETTI PLANTARI **NUOVA GENERAZIONE** **COMFORTACT™ PLUS**



CUSCINETTO BREVETTATO* = PIÙ COMFORT

**TESSUTO MORBIDO
E SOTTILE**
> Comodità ed
eliminazione del sudore

**MODULO IN GEL
DI SILICONE**
> Distribuisce le pressioni
e allevia i dolori

EFFETTO "SFERE"
> Accoglie il piede con la
massima comodità

**FASCIA
STABILIZZATRICE
SAGOMATA**
> Massimo
comfort tra le dita

TESSUTO ELASTICO
> Resistente all'usura da
contatto con la calzatura

*I cuscinetti COMFORTACT™ PLUS sono progettati con una tecnica innovativa protetta da brevetto.

INDICAZIONI: I cuscinetti COMFORTACT™ PLUS proteggono l'avampiede riducendo le pressioni e alleviando i dolori.

SPECIFICITÀ: La fascia stabilizzatrice ergonomica garantisce il massimo comfort rispettando la morfologia dell'alluce e limitando il rischio di irritazione tra le dita del piede. Nella zona plantare, un modulo in gel di silicone a effetto "sfere" EPITHELIUM 26® è stato studiato appositamente per accogliere l'avampiede con la massima comodità, distribuendo le pressioni.

ERGONOMIA: La forma speciale e l'elasticità costante del tessuto assicurano una tenuta sul piede ottimale. Inoltre, i cuscinetti sono talmente sottili da poter essere indossati anche in scarpe strette e favoriscono la stabilità mentre si cammina.

PULIZIA: Lavabili in lavatrice nel sacchetto salvabucato in dotazione.


CONSIGLI: Se i dolori plantari sono associati ad alluce valgo, si raccomanda l'uso dei cuscinetti doppia protezione EPITACT® per donare sollievo.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare su lesione cutanea. In caso di arterite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcere: consultare il proprio medico o podologo e monitorare il piede durante l'utilizzo.

COMPOSIZIONE: 84% silicone, 16% tessuto poliammide/elastan.


I materiali sono stati sottoposti a valutazione di biocompatibilità conformemente alla norma ISO 10993-1. In caso di problema, interrompere immediatamente l'uso e avvertire la società MILLET Innovation. MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di uso non conforme alle raccomandazioni del produttore. La lingua di riferimento è il francese. Stampigliatura CE iniziale: 2020.

 Lavabili in lavatrice a 30°C

 Non stirare, non sottoporre a vapore.

 Non lavare a secco.

 Non candeggiare.

 Non asciugare in asciugatrice.

 Vedere confezione.

Prodotto frutto della ricerca di MILLET Innovation.

 MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCIA


**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.it